

استخدام أقنعة الوجه (الكمامة)

أرتدي فقط كمامة جراحية نظيفة يمكن التخلص منها، و لا تعيد استخدام أي منتج مستهلك.

دائماً اتبع تعليمات الشركة المصنعة

كيفية وضع قناع



اغسل يديك قبل وضع قناعك.

١. ضع القناع على أنفك وفمك ، مع التأكد من مواجهة الجانب الصحيح للخارج.

٢. شكل الحافة العلوية للقناع إلى جسر أنفك.

٣. ربط الأربطة العليا عقده فراشه بالجزء الخلفي من رأسك. يجب أن تجلس الأربطة فوق أذنيك.

٤. ربط الأربطة السفلية في عقده فراشه إلى الجزء الخلفي من رقبتك. يجب أن تجلس الخيوط أسفل أذنيك.

٥. تأكد من أن القناع مناسب بشكل مريح حول الوجه وتحت الذقن.

٦. بمجرد وضع القناع على ، لا تلمس الجبهة.

كيفية إزالة القناع



قد يتلوث الجزء الأمامي من القناع - لا تلمسه.

اغسل يديك قبل نزع القناع.

١. قم بمسك الأربطة و فك العقد، السفلية أولاً ، ثم العلوية.

٢. قم بإزالة القناع دون لمس الجهة الأمامية الخارجية.

٣. امسك القناع من خلال الأربطة و أسقطه في حاوية النفايات.

٤. اغسل يديك أو استخدم مطهر اليد (الكحولي الأساس) على الفور.